

АО «КРОНТ-М»

141400 Россия, г.Химки, Московская обл., ул.Спартаковская, д.9, пом.1
Тел/факс. (495) 500-48-84 (многоканальный)
E-mail: info@kront.com, Internet: www.kront.com.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт стола пеленального **СП-01-«КРОНТ»**
зав. № _____

Дата изготовления «__» _____ 20__ г.

Штамп предприятия _____
подпись, штамп ОТК

Владелец и его адрес _____
название организации (полностью)
индекс, город, область/район, улица, дом, строение, телефон

Характер неисправности _____
заполняется лицом, ответственным за техническое обслуживание

Контактное лицо, ответственное за техническое обслуживание:

ФИО, телефон, e-mail

Дата возникновения неисправности _____

Подпись _____

Выполнена работа по устранению неисправностей:

_____ дата _____ подпись

Штамп предприятия



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРОНТ-М»**



**СТОЛ ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ
СП-01-«КРОНТ»**

ПАСПОРТ
КРПФ.942819.0800 ПС



Данное оборудование можно приобрести в компании SalutM.ru

г. Химки
Московская область

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Стол для пеленания детей **СП-01-«КРОНТ»** (далее по тексту «стол») предназначен для проведения медицинского осмотра, врачебных манипуляций и пеленания детей (регистрационное удостоверение №ФСР 2007/00115 от 12.03.2015 г.). Применяется для оснащения родильных домов, детских лечебных учреждений и т.д.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Каркас стола выполнен из облегченных металлических труб круглого сечения Ø22 мм, покрытых порошковой химически стойкой краской.
- 2.2. Столешница, нижняя полка и ящики выполнены из полимерных материалов Полипропилена и полистирола.
- 2.3. Стол оборудован поворотными 4 колесными опорами Ø50 мм с резиновым ободом и тормозом.
- 2.4. Габаритные размеры стола 890x780x920 мм.
- 2.5. Масса 16,5 кг.
- 2.6. Размеры рабочей поверхности столешницы 720x680x100 мм.
- 2.7. Рабочая поверхность нижней полки 770x400x10 мм.
- 2.8. Расстояние между столешницей и нижней полкой 320 мм.
- 2.9. Внутренние размеры ящика 375x275x100 мм.
- 2.10. Допустимая нагрузка не более, кг:
 - на столешницу 20;
 - на нижнюю полку 10.



Рис.1

2.11. Наружные поверхности стола устойчивы к дезинфекции способом протирания в соответствии с действующими методическими документами по применению конкретных дезинфицирующих средств, разрешенных в РФ для дезинфекции поверхностей.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Акционерное общество "КРОНТ-М" (АО "КРОНТ-М")
наименование организации или фирмы, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование декларатора о соответствии
 Зарегистрировано Администрацией Химкинского района Московской области 13.11.1992г. № 1370,
 ОГРН 1025006172168.
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)
 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Спартаковская, д. 9, пом. 1, телефон (495)572-84-10
адрес, телефон, факс
В ЛИЦЕ Генерального директора Сизикова Владимира Петровича
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация
ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
 Стол пеленальный СП-01-«КРОНТ» по ТУ 9452-012-11769436-2002
наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация
 Серийный выпуск
сведения о серийном выпуске, или партии (номер партии, номера изделий, заявки договора (контракта), накладная)
выпускаемая изготовителем
 Акционерное общество "КРОНТ-М" (АО "КРОНТ-М").
наименование изготовителя
 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Спартаковская, д. 9, пом. 1.
 Место производства:
 1.124489, Москва, г. Зеленоград, Сосновая аллея, д. 6А, стр. 3.
 2.141540, Московская обл., Солнечногорский район, пос. Поварово, ул. 8-го Марта, д. 19.
 3.601445, Владимирская обл., р-н Вязниковский, МО г. Вязники (городское поселение), г. Вязники, ул. Металлистов, д. 2.
 4.601441, Владимирская обл., р-н Вязниковский, МО г. Вязники (городское поселение), г. Вязники, ул. Благовещенская, д. 118.
адрес, наименование страны
 по ТУ 9452-012-11769436-2002
наименование и обозначение документации изготовителя
 Код ОК 005 (ОКП): 94 5210
 Код ТН ВЭД России: 9402 90 000 0
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
 ГОСТ Р 50444-92 (р.п. 3.4)
обозначение корневых документов, соответствию которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ
 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) № ФСР 2007/00115 от 12.03.2015г.;
 Протокол испытаний № 166/2015 от 19.05.2015г.
 ИЦ ООО "ЦСМИ ВНИИМП", рег. № РОСС RU.0001.21ИМ02
информация о документе, являющемся основанием для принятия декларации
 ДАТА ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ 21.05.2015
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО: 21.05.2018
 Руководитель
 В.П. Сизиков
подпись инициалы, фамилия
Сведения о регистрации декларации о соответствии
 ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ВНИИМП"
 ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрированного
 127422, г. Москва, Тимирязевская ул., д. 1, стр. 2, тел. (499) 641-55-27, факс (499) 641-55-27/www.ccme.ru ОГРН: 5077746891074
адрес, наименование, телефон, факс, сайт, ОГРН
 Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ИМ04 выдан 21.03.2011г. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
 Дата регистрации 21.03.2015, регистрационный номер РОСС RU.ИМ04.Д00017
дата регистрации и регистрационный номер декларации
 Руководитель органа по сертификации
 А.В. Машков
подпись инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание стола пеленального производить без специального инструмента. Не реже 1 раза в месяц проверять затяжку всех крепежных элементов, при необходимости подтянуть. Не реже 1 раза в месяц производить смазку подшипниковых узлов колесных опор. Смазка – литол ГОСТ 21150-75.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стола пеленального требованиям ТУ 9452-012-11769436-2002.

9.2. Гарантийный срок – 2 года со дня изготовления изделия при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.3. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации. Срок устранения неисправности не более 30 дней после получения изготовителем.

Внимание! Предприятие-изготовитель оплачивает услуги транспортной компании по доставке и отправке оборудования при гарантийном ремонте от терминала в городе потребителя до терминала в городе Москва.

Для ускорения процесса доставки предпочтительно пользоваться услугами следующих транспортных компаний: Деловые линии, Желдорэкспедиция.

9.4. При отправке стола на гарантийный ремонт необходимо приложить акт о возникновении неисправности, который должен содержать:

- дату возникновения неисправности;
- продолжительность работы до возникновения неисправности;
- краткое содержание неисправности;
- дату направления акта;
- принятые меры по устранению неисправности.

Адрес предприятия-изготовителя: АО «КРОНТ-М»
141400, Московская область, г. Химки, ул. Спартаковская, д.9, пом.1.
Тел/факс (495) 500-48-84 (многоканальный).
E-mail: info@kront.com, Internet: www.kront.com.

Внимание! В послегарантийный период предприятие-изготовитель осуществляет на договорной основе ремонт стола пеленального СП-01-«КРОНТ».

[Данное оборудование можно приобрести в компании SalutM.ru](#)

2.12. Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 4.2. по ГОСТ 15150.

2.13. Срок службы не менее 7 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стол пеленальный поставляется в разобранном виде (по заказу может поставляться в собранном)

Таблица 1

№	Наименование	Маркир. №	Кол-во
1	Стойка передняя с колесными опорами	001	1
2	Стойка задняя с колесными порами	002	1
3	Стяжка передняя	101	2
4	Стяжка боковая верхняя	102	2
5	Стяжка боковая нижняя	117	2
6	Опора полки нижней	301	1
7	Столешница	-	1
8	Нижняя полка	-	1
9	Ящик	-	2
10	Комплект крепежный №1 Ложемент – 10 шт. Болт М6х55 – 10 шт. Гайка М6 (колпачковая) – 10 шт. Шайба ø6 - 10 шт. Ключ S4 шестигранный внутренний	-	1
11	Комплект крепежный №2 Ложемент – 2 шт. Болт М6х55 – 2 шт. Гайка М6 (колпачковая) – 2 шт. Шайба ø6 – 2 шт.	-	1
12	Комплект крепежный №3 Втулка – 2 шт. Болт М6х60 – 2 шт. Гайка М6 (колпачковая) – 2 шт. Шайба ø6 – 2 шт.	-	1
13	Маркировочная табличка алюминиевая (зав.№, год выпуска)		1
14	Схема сборки		1
15	Упаковочный лист		1
16	Паспорт		1

4. СБОРКА СТОЛА ПЕЛЕНАЛЬНОГО

Для сборки стола пеленального необходим ключ шестигранный на 4 мм (находиться в комплекте №1)

- Провести распаковку транспортировочной тары.
- Освободить составляющие части стола от упаковки.

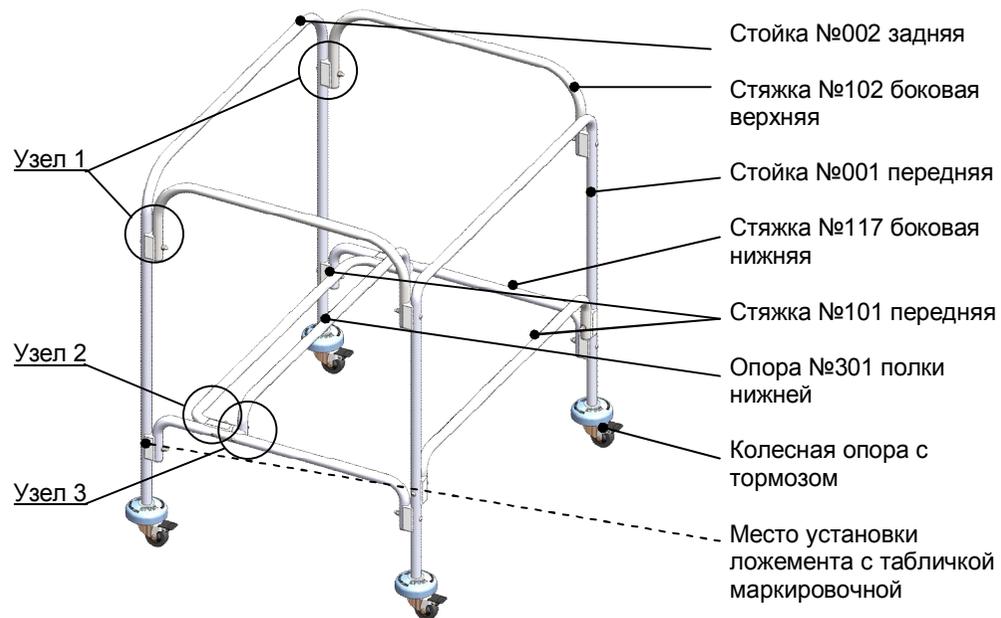


Рис.2 Каркас стола пеленального

Рекомендуемая последовательность сборки

(номера поставляемых комплектов соответствуют номерам сборочных узлов)

1. На один из ложементов из комплекта крепежного №1 наклеить маркировочную табличку алюминиевую (название изделия, зав.№, год выпуска), предварительно сняв защитный слой с клеящейся поверхности. Место установки ложементов с табличкой указано на рис.2.
2. На стойку переднюю №001 с колесными опорами установить стяжку переднюю №101 - **Узел 1**.
3. Стойку переднюю «001» и стойку заднюю №002 соединить между собой двумя стяжками боковыми верхними №102 и двумя стяжками боковыми нижними №117 - **Узел 1**.
4. На стяжки боковые нижние №117 установить стяжку переднюю №101 - **Узел 2** и опору нижней полки №301 - **Узел 3**.
5. Небольшим нажатием установить столешницу и нижнюю полку до полного соприкосновения с каркасом.
6. Установить ящики в направляющие, расположенные на нижней полке.
7. Протереть стол влажной ветошью.

Таблица 2

<p>Узел 1</p>	<p>Крепежные элементы из комплекта 1:</p> <p>Ложемент – 10 шт. Болт М6х55 – 10 шт. Гайка М6 (колпачковая) – 10 шт. Шайба ø6 - 10 шт.</p>
----------------------	--

<p>Узел 2</p>	<p>Крепежные элементы из комплекта 2:</p> <p>Ложемент – 2 шт. Болт М6х55 – 2 шт. Гайка М6 (колпачковая) – 2 шт. Шайба ø6 – 2 шт.</p>
<p>Узел 3</p>	<p>Крепежные элементы из комплекта 3:</p> <p>Втулка – 2 шт. Болт М6х60 – 2 шт. Гайка М6 (колпачковая) – 2 шт. Шайба ø6 – 2 шт.</p>

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол пеленальный СП-01-«КРОНТ» заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ 9452-012-11769436-2002 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Подпись _____

Штамп предприятия

6. УТИЛИЗАЦИЯ

6.1. Утилизация стола и его составных частей после истечения срока службы должна производиться в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми актами и санитарными правилами СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1. Стол в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться при следующих условиях:

- Температура окружающей среды -50 °С ÷ +50 °С;
- Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25 °С. При более высокой температуре влажность должна быть ниже указанной.

7.2. Стол должен транспортироваться в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с указанной на упаковке маркировкой («Верх», «Хрупкое. Осторожно», «Крюками не брать», «Беречь от влаги»). Допускается транспортирование всеми видами транспортных средств при температуре окружающего воздуха от -50 °С до +50 °С и относительной влажности 80% при температуре +25 °С.